


zomee

mas cuidado para mama & bebe

DOBLE EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE MATERNA



CONSIDERACIONES INICIALES

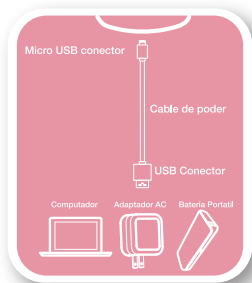

Zomee incluye un práctico cable de poder con conexión USB. Esto le permite utilizar diversas fuentes de poder:

1. **Puertos USB de un computador**
(Output: DC5V/1A)
2. **Adaptador de corriente AC**
(Input: AC110-230V/50Hz-60Hz; Output: DC6V/0.8A)
3. **Banco de batería portátil**
(Output: DC5V/1A)

 Para encender, se debe presionar el botón de encendido por 3 segundos



Clase II



Parte Tipo BF



Encendido



Advertencia



Precaución



Es recomendable mantener una buena postura erguida al utilizar este equipo.

Evite recostarse sobre los costados ya que esto puede generar reflujo de leche en su extractor.



Seque completamente el diafragma antes de utilizar



No esterilice los tubos

Cuando se usa correctamente el extractor Zomee, la leche no entra en contacto con los tubos por lo cual no es necesario esterilizarlos.

CONSIDERACION DE SEGURIDAD

Por favor lea completamente las instrucciones antes de usar el equipo.

Cuando utilice el adaptador de corriente, asegúrese que utiliza el voltaje adecuado. (110v-DC6V, 0.8A)

Utilice únicamente el adaptador de corriente original.

Si el cable de corriente sufre algún daño, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal autorizado para hacerlo.

Nunca sumerja el motor en agua ni lo lave con una esponja húmeda.

Mantenga el equipo y sus componentes fuera del alcance de los niños.

Cuando no se este utilizando, desconecte el equipo de la fuente de poder.

Este equipo no debe ser utilizado por personas que tengan una capacidad física mental reducida (incluyendo niños) o personas que carecen del conocimiento y la experiencia necesaria para el correcto uso de este.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Asegúrese que el embudo forme un sellado completo alrededor de su pecho.

Revise que todas las partes estén debidamente ensambladas y aseguradas.

Revise que la válvula "Duckbill" este limpia y libre de defectos.


Compruebe que los tubos esten debidamente asegurados al extractor y los puertos de su Zomee

QUE HAY EN LA CAJA

- 1- Base Zomee
- 1- Cable de poder USB
- 1- Adaptador AC 120-240V.
- 2- Extractores de mano.
- 2- Diafragmas.
- 2- Tapas de diafragma.
- 4- Valvulas tipo "Duckbill".
- 2- Embudo de pecho 24mm.
- 2- Embudo de pecho 28mm.
- 2- Adaptador botella standard
- 2- Tubos de 26"
- 2- Botella de 140ml.
- 2- Biberones para botella.
- 2- Tapa botellas.
- 2- Base para botella.



GUIA DE PARTES

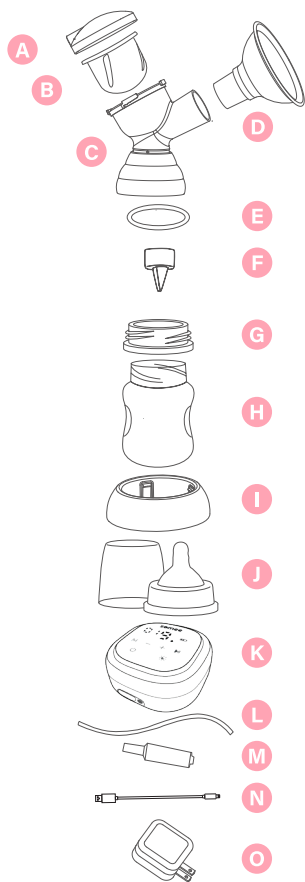

- A** TAPA DIAFRAGMA
- B** DIAFRAGMA
- C** EXTRACTOR
- D** EMBUDO DE PECHO
- E** SELLANTE
- F** VALVULA TIPO "DUCKBILL"
- G** ADAPTADOR BOTELLA CUELLO ESTANDARD
- H** BOTELLA
- I** BASE PARA BOTELLA
- J** BIBERON
- K** MOTOR BASE
- L** TUBO
- M** CONECTOR TUBO
- N** CABLE DE PODER
- O** ADAPTADOR AC

CONTROLES & INDICADORES



	Bateria
	Nivel de batería
	Nivel de succión
	Tiempo transcurrido (Zomee se apaga a los 30 minutos)
	Modo 2 fases (Modos de estimulación y extracción)
	Modo de masaje
	Modo de extracción
	Selección de modo
	Subir o bajar nivel
	Pausa / Continuar
	Encendido / Apagado
	Luz de noche

CARACTERISTICAS

Portable y ligera.

Tres diferentes estilos de extracción ajustables para su mayor comodidad.

Pantalla de fácil lectura de día y de noche.

Sistema cerrado para mayor higiene, seguridad, y facilidad de limpieza.

Se puede usar como extractor doble o sencillo.

Batería recargable de Litio de alto rendimiento y un cable de poder con conexión USB que le permite utilizar diversas fuentes de poder. Ideal para mamás que trabajan o viajan.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE EMPEZAR

- Lave cuidadosamente las manos antes de tocar cualquier componente.
- Revise cuidadosamente las partes antes de usar. De ser necesario, reemplace las partes danadas o gastadas.
- Asegure que todos los componentes han sido debidamente esterilizados.
- Ensamble todos los componentes siguiendo paso a paso las recomendaciones del fabricante (Ver instrucciones de ensamblado)
- Asegure que los tubos estén debidamente asegurados para prevenir perdidas de succion.
- Compruebe que la bateria esta lo suficientemente cargada.
- Masajee su pecho durante 5 minutos con una toalla tibia para facilitar la extraccion.

EXTRACCION

- Coloque el embudo sobre su pecho; procure alinear correctamente el embudo con su pezón.
- Presione por 3 segundos el boton de encendido (⏻) para encender el extractor.
- Zomee cuenta con 3 modos de extraccion

Modo Masaje (≈)

Modo 2 fases (💧)


Modo Extraccion (💧)

Nota: Zomee inicia en modo 2 fases.

- Presione el boton de seleccion de modo (M) para cambiar de modo.

Presione para cambiar modo

Presione por 3 segundos para encender

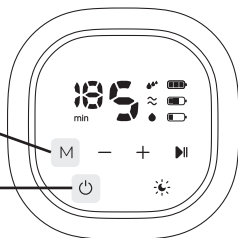


- Se recomienda iniciar en Modo Masaje (≈) en nivel, 1 e ir aumentando hasta que encuentre el nivel donde se sienta mas comoda. Mantengase en este modo hasta que la leche comience a fluir. Una vez esto ocurra, cambie a Modo de Extraccion (💧) comenzando en nivel 4 o 5 (o el ultimo nivel que haya estado utilizando en modo masaje)
- Usted puede seleccionar el nivel de Masaje o Estimulacion, utilizando los botones para aumentar (+) o disminuir (-)
- Cuando la leche comienza a fluir, se recomienda pasar a Modo de Extraccion (💧) donde experimentara una succion mas fuerte y profunda, imitando el patron de succion y alimentacion de los bebes.
- Usted puede seleccionar el nivel de succion en Modo de Extraccion, utilizando los botones para aumentar (+) o disminuir (-)

INSTRUCCIONES DE USO

Nota: Usted no necesita utilizar el nivel mas alto de succion por extraer mas leche. Por favor utilice el nivel donde se sienta mas comodo.

- Zomee cuenta con una util funcion de pausa. Solo presione el boton de pausa (⏸) para detener momentaneamente la sesion si esta experimentando dolor, malestar, o simplemente necesita tomar un momento para hacer otra actividad.

Presione nuevamente el boton (⏸) para reanudar la sesion.

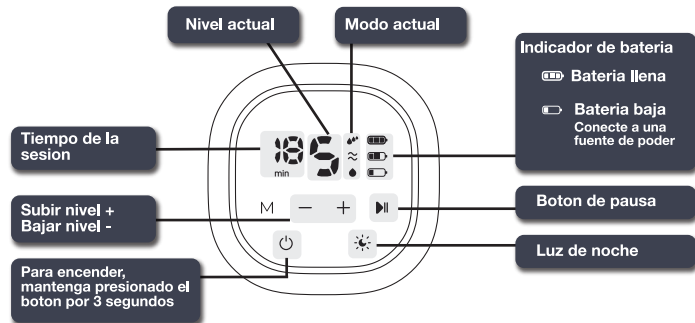

Una sesion promedio puede durar entre 15 y 30 minutos. Sin embargo esto puede variar segun la persona.

Nota: Zomee se apaga automaticamente despues de 30 minutos.

- Al terminar, presiona el boton de encendido/apagado para apagar (⏻) su Zomee, cuidadosamente remueva el extractor de su pecho


Recomendamos insertar un dedo entre su pecho y el extractor para romper el vacio. De esta manera le sera mas facil remover el extractor de su pecho.

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA


- Almacene la leche extraida en contenedores esterilizados. Proceda inmediatamente a guardarla en la nevera o congelador.
- Usted puede almacenar la leche extraida en el refrigerador hasta por 48 horas (No en la puerta) o en el congelador hasta por 3 meses.
- Marque los contenedores con fecha y hora. Utilice los mas antiguos primero.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

*Lavese bien las manos antes de manipular su Zomee.
Asegure que todas las partes esten limpias antes de usar.*

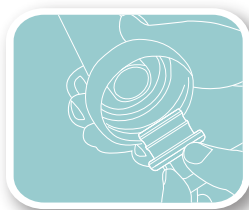

1 Inserte la válvula en el extractor.

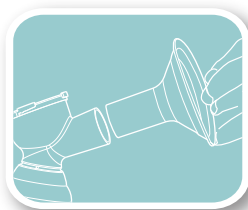

2 Inserte el embudo de pecho en el extractor.



3 Coloque el diafragma en su lugar.



4 Asegure la tapa del diafragma. Compruebe que esta completamente ajustada.




5 Enrisque la botella firmemente.



6 Conecte el tubo a la tapa del diafragma.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

*Lavese bien las manos antes de manipular su Zomee.
Asegurese que todas las partes esten limpias antes de usar.*

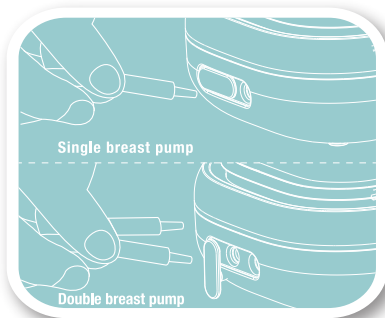

7 Extraccion Simple
Conecte el otro extremo del tubo a la base del motor en el puerto de coneccion.

El segundo puerto debe estar cubierto con un tapon.

Extraccion Doble
Conecte ambos tubos a los dos puertos en la base del motor.

Se debe remover el tapon del segundo puerto.



8 Conecte el cable micro USB a la base del motor. El otro extremo del cable puede conectarlo al adaptador de corriente o cualquier puerto USB.



9 Una vez termine, proceda a almacenar la leche. Desarme y limpie todas las partes que entran en contacto con la leche.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACION

ANTES DE USAR

- No lave / esterilice los tubos. Esto nunca entrarán en contacto con la leche materna ya que Zomee cuenta con un sistema de extracción cerrado.
- Lave todas las otras partes en agua jabonosa tibia, enjuague bien y permita que se sequen al aire sobre una toalla o toallas de papel. *** Se recomienda el uso de jabón antibacterial para asegurarse de no dejar una película en el embudo que pueda impedir las secreciones naturales de las glándulas mamarias.
- Para esterilizar:
 - Accesorios de silicona (válvulas, diafragma y biberones). Pase las piezas por agua hirviendo por menos de 2 minutos. Nunca deben exponerse a altas temperaturas durante mucho tiempo para extender su vida útil y rendimiento al máximo. No se recomienda colocar los accesorios de silicona en el lavavajillas.
 - Todas las demás partes (botellas, extractores, embudos, tapa del diafragma). Póngalos en una olla grande con suficiente agua para cubrir todas las partes (al menos 4 "por encima de las partes). Coloque la tapa en la olla y deje hervir. Coloque los accesorios en agua hirviendo y apague el fuego (el agua continuará hirviendo). Retire los accesorios después de 3-5 minutos.
 - En un área limpia antes de usar, coloque todos los accesorios esterilizados en una rejilla de secado o un paño limpio para secar al aire.

DESPUES DE USAR

- Después de cada uso, desarme todas las partes que entren en contacto con la leche.
- Lave con agua jabonosa tibia, enjuague bien y deje secar al aire.
- Para limpiar la base del motor (si es necesario), limpie con un paño húmedo y deje secar al aire. No lave ni ponga en el lavavajillas.
- Los accesorios almacenados en el refrigerador entre sesiones de bombeo pueden tener condensación cuando se usan. Para evitarlo, séquelos con un paño de algodón o una toalla de papel y déjelos secar al aire antes de usarlos.
- No lave / esterilice los tubos. Estos nunca entrarán en contacto con la leche materna ya que el sacaleches Zomee cuenta con un sistema de extracción cerrado.

ADVERTENCIA

- Durante la esterilización, no hierva sus accesorios durante más de 5 minutos.
- Si usa una olla que es demasiado pequeña y / o hierva sus partes durante más de 5 minutos, sus partes pueden deformarse durante de la esterilización.
- El usar un microondas para esterilizar, puede resultar en un cambio de color de las partes. Es un problema cosmético y no tiene ningún efecto sobre la seguridad de las piezas.
- Si usa un lavavajillas, coloque los artículos solo en el ciclo de lavado, en la rejilla superior y deje que se seque al aire.
- Las bolsas de microondas "se pueden usar" si se agrega la cantidad adecuada de agua. El usuario también debe seguir las instrucciones del fabricante de la bolsa.

TARJETA DE GARANTIA

Gracias por preferir nuestro producto. Por favor guarde su recibo de compra, ya que este será necesario para realizar cualquier reclamación.

Nombre:		Telefono:	
Modelo:		Fecha de Compra:	
Lugar de la compra:			
Direccion:			

Para reclamos por garantia o partes de reemplazo por favor llame al numero **954-678-1099** o **1-888-662-7159**, o escribanos a **INFO@ZOMEE.COM**
Visite **ZOMEE.COM** para mayor informacion.

ATENCION

Tenga en Cuenta:

1. Este producto cuenta con una garantía de 12 meses desde la fecha de compra. Por favor contacte el establecimiento donde realizo la compra para cualquier reclamo de garantía.
2. Esta garantía no cubre: Daños causados por el mal uso o la alteración del producto. Daños causados por no seguir las indicaciones del fabricante o la utilización de accesorios distintos a los recomendados. Tampoco cubre el desgaste normal del producto debido al uso.
3. El usuario de este producto asume toda la responsabilidad y riesgo relacionado a la utilización de este producto.
4. Por favor, siga todas las indicaciones locales y nacionales para la correcta disposición final de este producto.
5. Advertencia: Esta completamente prohibido la modificación de este producto o sus accesorios.